



Abnahme der Speichelprobe



ANLEITUNG ZUR PROBENNAHME - HUMAN - FE

Melio serv®

Anleitung zur Abnahme von Speichel-Proben:


Wir empfehlen die Verwendung der „Melio.serv® Comfort-Box“.

Stellen Sie sicher, dass die Person, für die eine Untersuchung beabsichtigt ist, auch mit der vorgesehenen Maßnahme einverstanden ist.

Nehmen Sie eine ausreichende Speichel-Probe wie folgt:

SPEICHELPROBE (ideal als Alternative, wenn keine Haare abgenommen werden können (z.B. nach Chemo-Therapie)).

- Nehmen Sie den Melio.serv Abstrichtupfer zur Hand und prüfen Sie vor Verwendung dessen Unversehrtheit (1). Verwenden Sie den Kokon nur dann, wenn die Perforation einwandfrei ist.
- Öffnen Sie die Versiegelung **erst unmittelbar vor** der Probenabnahme (2).
- Entnehmen Sie die Speichelprobe aus der geöffneten Mundhöhle der zu untersuchenden Person.
- Achten Sie darauf, dass die Probe nicht unmittelbar nach der Aufnahme von Nahrung bzw. Flüssigkeit erfolgt (ggf. ca. 20 min warten). Sorgfältig und bestimmungsgemäß vorgehen (3).
- Sorgen Sie dafür, dass der Abstrichtupfer gut eingespeichelt wird. (ggf. Mund schließen – **MAX: 10sec.**) (4)
- Nach der Speichelabnahme (5) geben Sie den Abstrichtupfer unmittelbar und sorgsam in den Plastikkokon zurück (6). **Legen Sie die Probe zuvor nicht ab und berühren Sie diese nicht ungeschützt.** (die Verwendung von Einmalhandschuhen bzw. Mundschutz ist empfohlen).
- Vermeiden Sie Kontaminationen mit anderen Proben oder Verunreinigungen (Schutzvorkehrungen treffen).
- Verschließen Sie den Plastikkokon sorgfältig mit dem beprobten Abstrichtupfer (7) und versiegeln Sie den Kokon mit unserem ReSeal (8) (liegt der Comfort-Box bei).
- Schreiben Sie den Namen des Probanden, dessen Geschlecht, Geburtsdatum und das Abnahmedatum auf den Kokon (9).
- Füllen Sie die notwendigen Unterlagen aus. (u.a. Datenschutz freigeben).
- Geben Sie die Probe(n) **und** alle erforderlichen Unterlagen (vgl. „Checkliste“) zurück in die Comfort-Box. Verwenden Sie bei Mehrfacheinsendungen für die einzeln beprobten Comfort-Boxes einen geeigneten Versandkarton o.ä.
- Füllen Sie den Rücksendeaufkleber mit Ihrer Absender-Adresse aus.
- Kleben Sie den ausgefüllten Rücksendeaufkleber auf die Frontseite der Box. (Zum einfachen Ablösen der Klebefolie Aufkleber in Höhe der Anschrift knicken.)
- Frankieren Sie Ihre Probensendung ausreichend vor dem Versand.
- **Geben Sie Ihre Sendung** für den Rückversand an Melio.serv **zum Versand.**

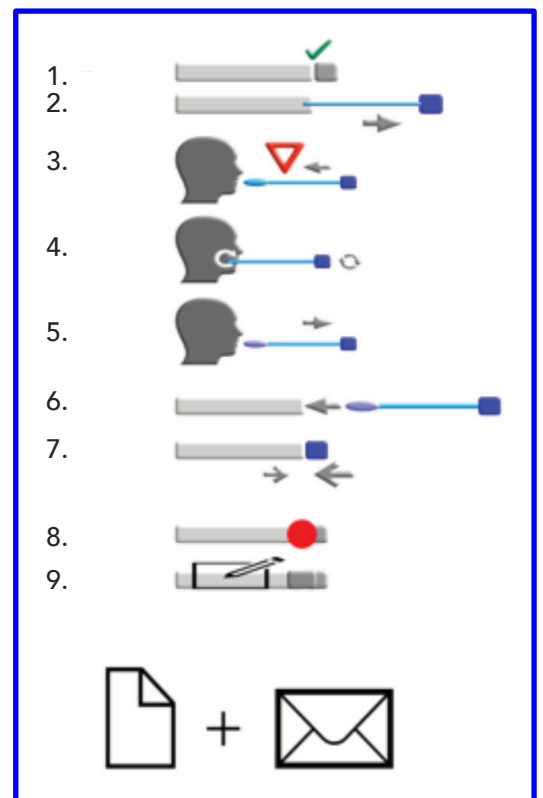

Falls erforderlich, halten Sie Rücksprache mit Ihrem Facheinsender (m/w/d).

Setzen Sie die Probe(n) nicht großer Hitze oder Sonnenstrahlung aus!

Wir empfehlen den umgehenden Versand nach Probennahme an Melio.serv.

Prüfen Sie Ihre Sendung vor Versand auf Vollständigkeit.

Bei Mehrfach-Einsendungen sorgen Sie UNBEDINGT dafür, dass Probe und Dokumente für jede Ihrer Proben klar und deutlich zugeordnet werden können.