


# Speichelprobe

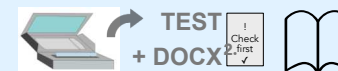


Machen Sie sich mit dem Inhalt der Box vertraut und lesen Sie die Anleitungen sorgfältig durch.

## So geht's



- Nehmen Sie den Melioserv Abstrichtupfer zur Hand und prüfen Sie vor Verwendung dessen Unversehrtheit (1). Verwenden Sie den Kokon nur dann, wenn die Perforation einwandfrei ist.
- Öffnen Sie die Versiegelung **erst unmittelbar vor** der Probenabnahme (2).
- Entnehmen Sie die Speichelprobe aus der geöffneten Mundhöhle der zu untersuchenden Person.
- Achten Sie darauf, dass die Probe nicht unmittelbar nach der Aufnahme von Nahrung bzw. Flüssigkeit erfolgt (ggf. ca. 20 min. warten). Sorgfältig und bestimmungsgemäß vorgehen (3).
- Sorgen Sie dafür, dass der Abstrichtupfer gut eingespeichelt wird. (ggf. Mund schließen). **Max. 10 sec.** (4).
- Nach der Speichelabnahme (5) geben Sie den Abstrichtupfer unmittelbar und sorgsam in den Plastikkokon zurück (6). **Legen Sie die Probe zuvor nicht ab und berühren Sie diese nicht ungeschützt** (Helfenden Personen ist eine Verwendung von Einmalhandschuhen bzw. Mundschutz empfohlen).
- Vermeiden Sie Kontaminationen mit anderen Proben oder Verunreinigungen (ggf. Schutzvorkehrungen treffen).
- Verschließen Sie den Plastikkokon sorgfältig mit dem beprobten Abstrichtupfer (7) und versiegeln Sie den Kokon mit unserem ReSeal an der Nahtstelle (8) (*ReSeal liegt der Comfort-Box bei*).
- **Schreiben Sie den Namen** des Probanden, dessen Geschlecht, Geburtsdatum und das Abnahmedatum **auf den Kokon** (9).
- Füllen Sie die notwendigen Unterlagen aus. (u.a. Datenschutz freigeben).
- Geben Sie die Probe **und** alle erforderlichen Unterlagen zurück in die Comfort-Box. Rücksendelabel entnehmen, Box verschließen. **Klebestreifen im Faldeckel der Comfort-Box nutzen.** Verwenden Sie bei Mehrfacheinsendungen für die Einzelboxes einen geeigneten Versandkarton.
- Füllen Sie den Rücksendeaufkleber mit Ihrer Absender-Adresse aus. Einfaches dezentrales Knicken des Aufklebers hilft beim Ablösen der Folie.
- Kleben Sie den ausgefüllten Rücksendeaufkleber auf die Frontseite der Box.
- Frankieren Sie Ihre Probensendung ausreichend.
- **Geben Sie Ihre Sendung** für den Rückversand an Melioserv an Ihren Versender.

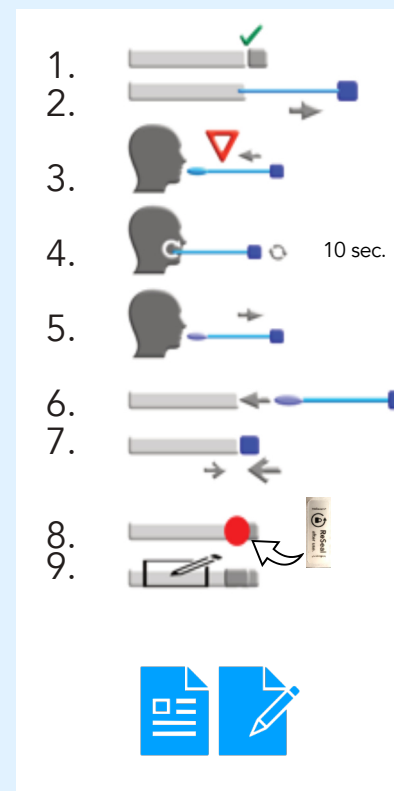

Protect from sun, heat + water



Rücksende-Aufkleber ausfüllen & auf die Box kleben!



Für alle Verfahren gleich. EU-NU-KU